


# Dismoclean<sup>®</sup> 25 acid

## Maschinelle Aufbereitung

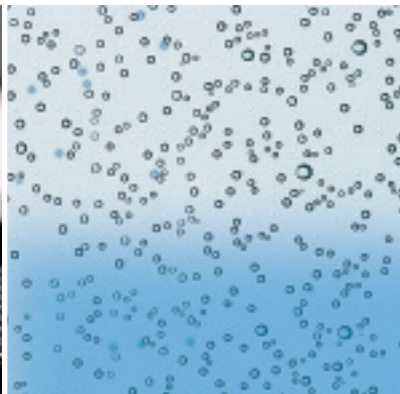

**Flüssiges Neutralisationsmittel für den Einsatz in Spezialspülmaschinen**



# Dismoclean® 25 acid

## Eigenschaften

- phosphatfrei
- tensidfrei
- umweltverträglich

Dismoclean® 25 acid ist ein flüssiges, mildsaures Neutralisationsmittel auf der Basis von Citronensäure, das auch empfindliche Materialien nicht angreift. Dismoclean® 25 acid dient der Neutralisation verschleppter Alkalireste aus der Spüllauge nach vorheriger Reinigung mit Dismoclean® 21 pur oder -plus. Ebenfalls ist Dismoclean® 25 acid – bei Einsatz von Dismoclean® 28 alka one oder Dismoclean® 24 vario – geeignet, wenn nicht optimale Wasserqualitäten im Prozess vorliegen. Dismoclean® 25 acid enthält keinerlei Tenside und ist deshalb auch für Anwendungen, die auf Spuren oberflächenaktiver Stoffe empfindlich reagieren, geeignet.

## Zusammensetzung

Organische Säure.

## Anwendung

Dismoclean® 25 acid wurde speziell für den Einsatz in Spezialspülmaschinen entwickelt. Es dient primär der Neutralisation verschleppter Alkalireste aus dem Hauptspülgang. Dismoclean® 25 acid ist deshalb im Zusammenhang mit alkalischen Spülmitteln geeignet und dort, wo es auf völlige Phosphat- bzw. Tensidfreiheit ankommt.

Nachfolgend einige Anwendungsgebiete:

- OP-Bereich
- Anästhesie
- Intensiv
- Mikrobiologie
- Labor

Zusätzlich ist dieses Neutralisationsmittel, in Verbindung mit Dismoclean® 21 pur flüssig, im Vario-TD-Programm bestens geeignet. Sofern es die Wasserqualitäten im Vario-TD-NR-Programm erforderlich machen, ist Dismoclean® 24 Vario mit Dismoclean® 25 acid einzusetzen.

## Dosierung

Die Dosierung hängt im wesentlichen von der Stärke der Alkalität der verschleppten Lauge ab. Im allgemeinen genügt eine Konzentration von 1-3 ml/l Spüllösung. Die Zugabe erfolgt normalerweise automatisch über die Dosierpumpe.

## Listung

CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG).

## Physikalische Daten

Dichte (20 °C)	ca. 1,17 g/ml
pH-Wert Konzentrat	ca. 1
Lösung	ca. 3

## Packungen

Packung	Einheit	Art.-Nr.
5 kg-Kanister	1 Stück	910890
10 kg-Kanister	1 Stück	910880
25 kg-Kanister	1 Stück	910870
240 kg-Fass	1 Stück	973858

**Hinweis: Kennzeichnung gem. Gefahrstoff-Verordnung für das Konzentrat: Xi Reizend. R36 Reizt die Augen. S25 Berührung mit den Augen vermeiden. S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.**

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.