


# Dismoclean<sup>®</sup> 26 acid

## Maschinelle Aufbereitung

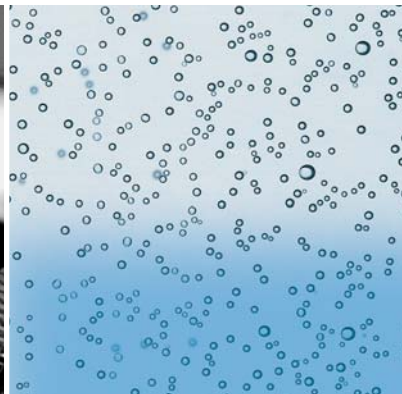

**Flüssiges Vorspül- und Neutralisationsmittel für den Einsatz in Spezialspülmaschinen**

Ein Unternehmen der  
HARTMANN GRUPPE



# Dismoclean® 26 acid

## Eigenschaften

Dismoclean® 26 acid ist ein saures Vorspül- und Neutralisationsmittel auf der Basis von Phosphorsäure und Komplexbildnern. Diese Formulierung mindert zusätzlich die Korrosionsanfälligkeit bei den meisten chirurgischen Stählen. Dismoclean® 26 acid wurde speziell für den Einsatz in Spülmachines entwickelt.

## Zusammensetzung

Phosphorsäure.

## Anwendung

### 1. Vorspülmittel

Dismoclean® 26 acid wird bei Schmutzablagerungen, welche durch eine alkalische Reinigung nicht beseitigt werden können, als Vorwaschmittel eingesetzt.

Es vermag Eiweißstoffe, organische Basen, Carbonate und Hydroxide gut anzulösen, so dass die anschließende alkalische Reinigung erleichtert wird.

Dismoclean® 26 acid beseitigt eventuelle Kalkablagerungen in der Spülmachine.

### 2. Neutralisationsmittel

Dismoclean® 26 acid sollte immer nach einer hochalkalischen Reinigung und immer dann, wenn chirurgische Instrumente aufbereitet werden, zum Einsatz gelangen. Dadurch erfolgt eine Neutralisation, die der Werterhaltung der Instrumente dient.

Nachfolgend einige Anwendungsgebiete:  
Instrumentenaufbereitung

- OP-Bereich
- Anästhesie
- Intensiv
- Mikrobiologie
- Labor

## Dosierung

Im Allgemeinen genügt eine Konzentration von 1-3 ml/l Spüllösung. Die Zugabe erfolgt normalerweise automatisch über die Dosierpumpe.

## Listung

CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG).

## Chemisch-physikalische Daten

Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert Konzentrat	ca. < 1
pH-Wert 1 %ige Lösung (VE-Wasser)	ca. 2
Dichte (20 °C)	ca. 1,42 g/cm <sup>3</sup>

## Packungen

Packung	Liefer-Einheit	Art.-Nr.
7 kg-Kanister	1 Stück	910990
12 kg-Kanister	1 Stück	910980
35 kg-Kanister	1 Stück	910970
280 kg-Fass	1 Stück	973868

**Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG: C. Ätzend.** Enthält: Polyphosphorsäure. Verursacht Verätzungen. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind daher die Grundmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten entsprechend der Schutzstufe 2 § 9 GefStoffV zu beachten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

